

装置ソフトウェアの自動バージョンアップ手順

本チラシが同封された試験紙を初めてお使いになる場合は、パソコンソフトウェア(唾液検査結果シート作成プログラム)をバージョンアップした後に、以下の手順で装置ソフトウェアをバージョンアップしてください。


- 1 パソコンと装置をUSBケーブルで接続した状態で、パソコンソフトウェアを起動します。
- 2 装置の電源を入れます。この時に、パソコンに以下の画面が表示された場合は、手順③に進み装置のソフトウェアをバージョンアップしてください。

参考 バージョンアップの途中でエラーやトラブルが発生した場合は、パソコンソフトウェア、装置を再起動して手順③から再度実施してください。

接続された装置のソフトウェアをバージョンアップする必要があります。
装置の電源をお切りください。




- 3 装置の電源を切り、手順②のパソコンの画面で[OK]をクリックします。
- 4 パソコンに以下の画面が表示されたら、再度、装置の電源を入れます。

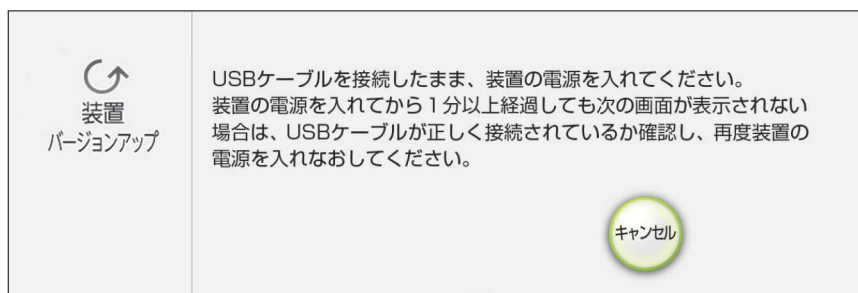


参考 装置の電源を入れてから1分以上、次の画面が表示されない場合
USBケーブルが正しく接続されているか確認し、再度装置の電源を入れなおしてください。

- 5 自動的に以下の画面がパソコンに表示され、装置ソフトウェアのバージョンアップが始まります。バージョンアップ中は、USBケーブルを抜かないでください。また装置の電源を切らないでください。

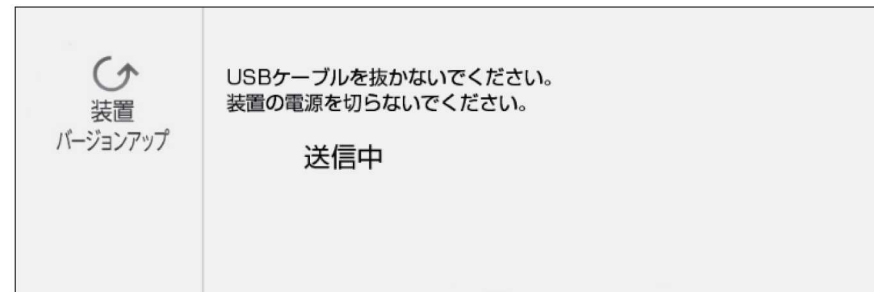

- 6 バージョンアップが完了すると、パソコンに以下の画面が表示され、自動的に装置の電源が切れます。

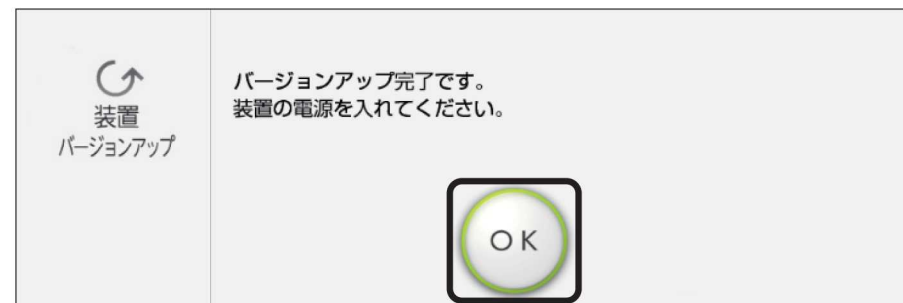

- 7 手順⑥のパソコンの画面で[OK]をクリックした後、再度、装置の電源を入れてください。パソコン、装置ともトップメニュー画面が表示されます。