

arkray

唾液検査用装置

SiLL-Ha

ST-4911 | 取扱説明書

アークレイ株式会社


1.5.2 唾液検査結果シート作成プログラムをインストールする [Mac編]




Macをご使用の場合は、以下の手順にしたがって唾液検査結果シート作成プログラムをインストールしてください。

準備するもの：USBメモリ（付属品）


- ① USBメモリをパソコンのUSBポートに接続します。
- ② USBメモリ内の「Mac版_唾液検査結果～.pkg」をパソコンのデスクトップにコピーし、ダブルクリックします。
 - ・ インストーラ画面が表示されます。
- ③ [続ける] をクリックします。

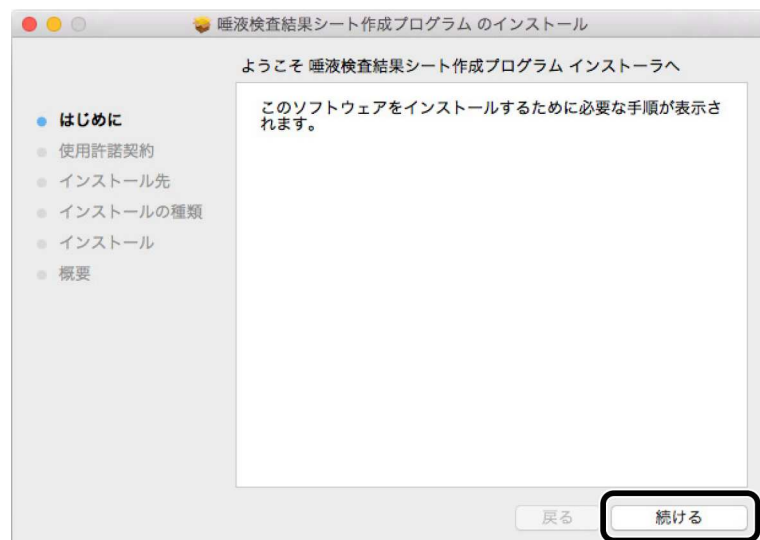


- ④ 使用許諾契約をお読みいただき、[続ける] をクリックします。

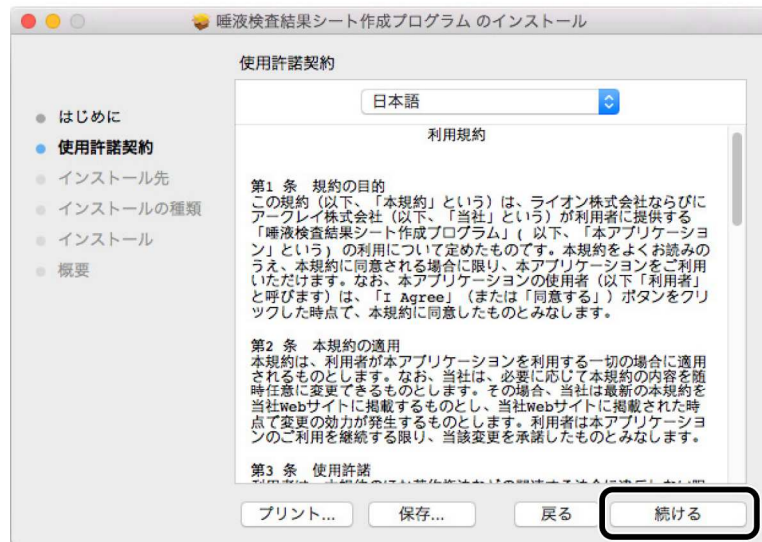


- ⑤ [同意する] をクリックします。

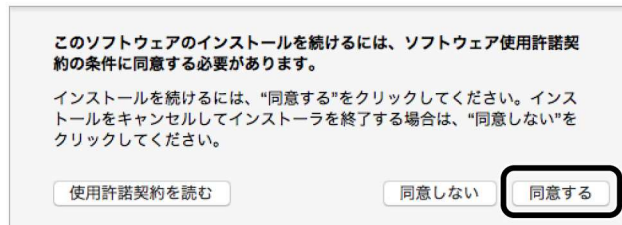


- ⑥ [インストール] をクリックします。

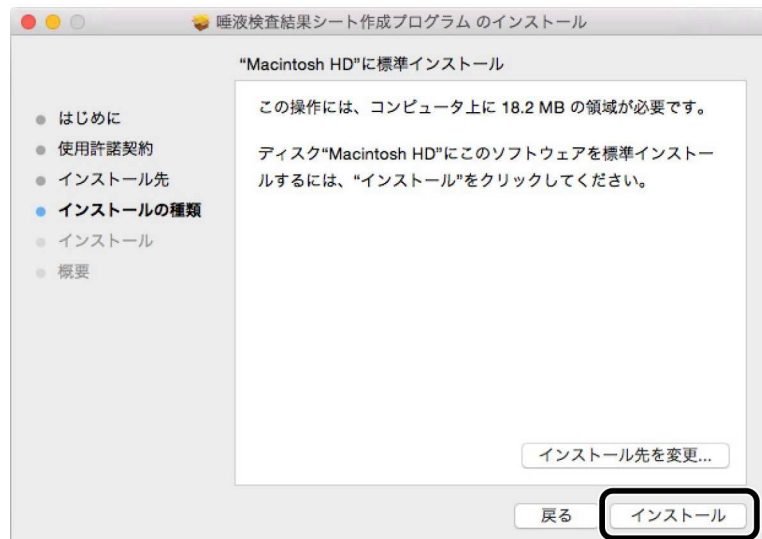

- ⑦ [ユーザ名] と [パスワード] を入力し (a)、[ソフトウェアをインストール] をクリックします (b)。
- ・ インストールが開始されます。

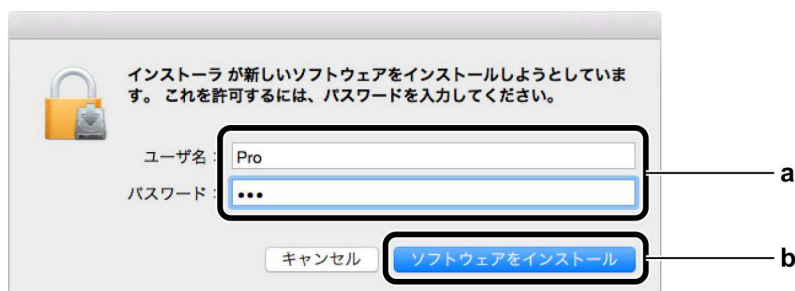

- ⑧ 以下の画面が表示されたら、[閉じる] をクリックします。

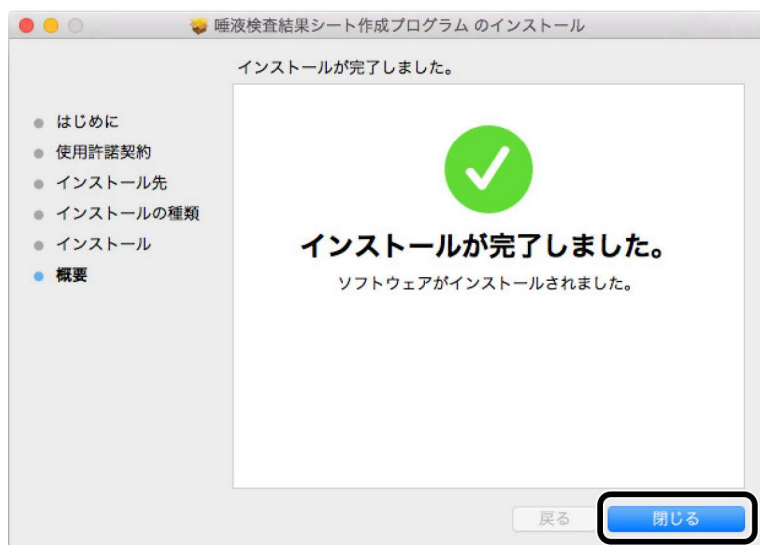

- ⑨ デスクトップに以下のショートカットアイコンが作成されていることを確認します。



- ⑩ USBメモリをパソコンから取りはずします。

→1-19ページ「1.5.3. 装置・パソコン・プリンタを接続する」に進みます。