

唾液検査装置 シルハ 簡易操作マニュアル

- ① 紙コップに出した精製水を患者さんに口に含んでもらい、10 秒間しっかりとうがいをした後、紙コップに戻してもらいます。(測定資料の準備)




- ② PC 上のアプリを立ちあげた後に装置の電源ボタンを長押しして電源を入れます。



逆になると測定画面にいけないことがあるので注意！

- ③ 測定ボタンを押し、カルテ番号と患者氏名を入力して[OK]ボタンを押します。
(生年月日・年齢・性別は任意)

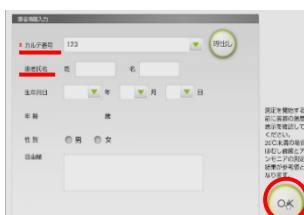

- ④ 測定する直前に試験紙を取り出し、予め用意したティッシュペーパーの上に置きます。




- ⑤ 紙コップ内の試料をスポイトで軽くかき混ぜて攪拌します。



- ⑥ 気泡が入らないように注意しながら試料をスポイトで吸引します。

一気に点着できるように、できるだけ多く吸引すると滴下しやすいです。

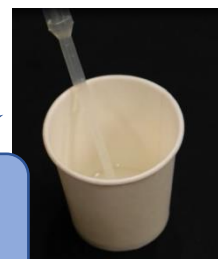

- ⑦ 試験紙の 11 個のパッドの中央に 1 滴ずつ試料を滴下します。
できるだけスピーディに滴下を行って下さい。



- ⑧ 11 個目のパッドへの滴下後、すぐに装置の右下にある[開始]ボタンをタッチします。



- ⑨ 10 秒のカウントダウンが始まりますので、試験紙を垂直にして余剰液をティッシュペーパーで吸い取ります。



あまり動かさず、じわーっと余剰液を吸わせるようにしましょう。

- ⑩ 10 秒経過の『ピッ、ピッ、ピー』という音が鳴った後、30 秒以内に装置のカバーを開け、試験紙を装置の試験紙ホルダの溝に合わせてセットします。



- ⑪ 装置測定部のカバーを閉めます。

↓ ↓ ↓

5 分後、測定結果が PC に表示されるので、表示タイプとコメントを選び[次へ]を押します。



- ⑫ [印刷]ボタンを押すと、検査結果が印刷されます。

