

SillHa Connect

導入方法

対応条件/OS

- ・インターネット接続ができる端末
- ・Windows10(64bit版) / Windows11(64bit版)
または Mac OS 10.15 ~ 13.4

マニュアル内に
ソフトウェアのダウンロードURL
を設置しています

セミナー後に送付するメール内、

《ソフトウェアのインストールマニュアル》をクリック

シルハパーパー使用施設用 URL <http://www.arkray.co.jp/sw/3b/>
STチェック使用施設用 URL <http://www.arkray.co.jp/sw/4c/>

こちらのURLからもインストールマニュアルへ
アクセスできます。

現ソフトウェアの
測定データを取り出し

現ソフトウェアを
バージョンアップ

⇒Ver V4.XXへ
(ソフトウェア)

取り出した
測定データを
インポート

SillHa Connect
アカウント登録

装置の
バージョン
アップ

⇒Ver2.41へ
(装置)


現ソフトウェアの
測定データを取り出し

現ソフトウェアを
バージョンアップ
⇒Ver V4.XXへ
(ソフトウェア)

取り出した
測定データを
インポート

SillHa
Connect
アカウント登録

装置の
バージョン
アップ
⇒Ver2.41へ
(装置)

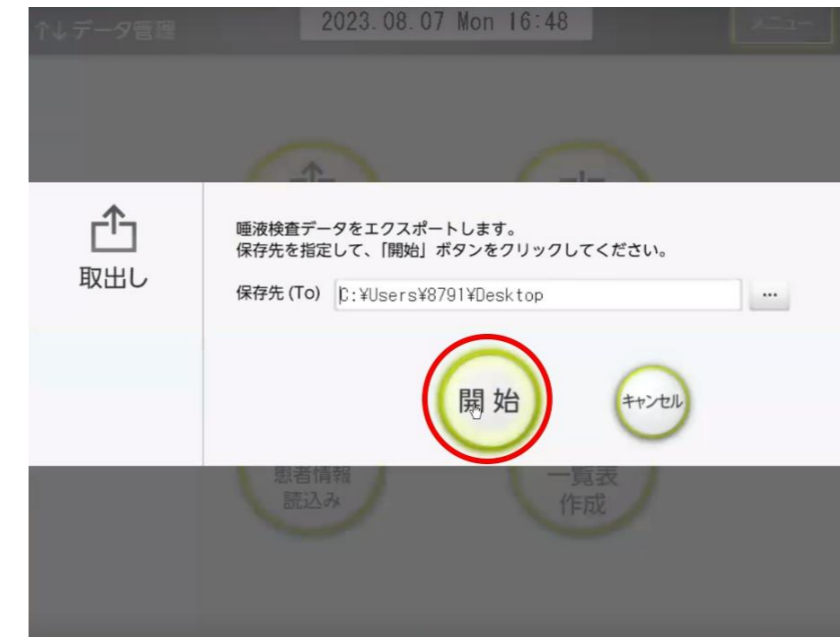

必ずバージョンアップ前に
実施してください！
バージョンアップだけでは
過去のデータは自動的に
引き継がれません！！

指定した保存先に今までに測定したデータと
ご施設情報のファイルが作成されます



バージョンアップ前の 注意点

測定データを取り出した後、右上の×を押してソフトウェアを終了してください。
装置の電源はオフの状態で作業してください。

LH-4912/ST-4911のソフトウェアのバージョンアップについて (6項目)

ご自身の環境に合わせて以下のページへお進みください。

▼Windows

- ・ [既にSillHaを使っている](#)
- ・ [SillHaを使ったことがない](#)

▼Mac

- ・ [既にSillHaを使っている](#)
- ・ [SillHaを使ったことがない](#)

インストールマニュアル 1ページ目

1. ソフトウェアのダウンロードとインストール

《重要》

- ・ 新しいバージョンのインストールは、旧バージョンのソフトウェアを完全に終了した状態で行ってください。
- ・ PCに装置を接続している場合は、装置の電源をオフにしてください。全ての設定が完了した後に、装置のファームウェアバージョンアップを行うためです。


以下の手順で新バージョンのダウンロードとインストールを行います。

1. ダウンロードページから新しいバージョンのソフトウェアをダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルを開き、画面の指示に従ってインストールを進めます。

【Windows版ソフトウェアダウンロード】
対応OS: Windows10(64bit版) / Windows11(64bit版)
※Windows10(32bit版)には対応していません。
※使用環境や設定状況によっては正しく動作しない可能性があります。
サイズ: 260MB

インストールマニュアル 3ページ目



ソフトウェアダウンロードのURLをクリックし、表示に沿ってダウンロード→インストールを実施します。

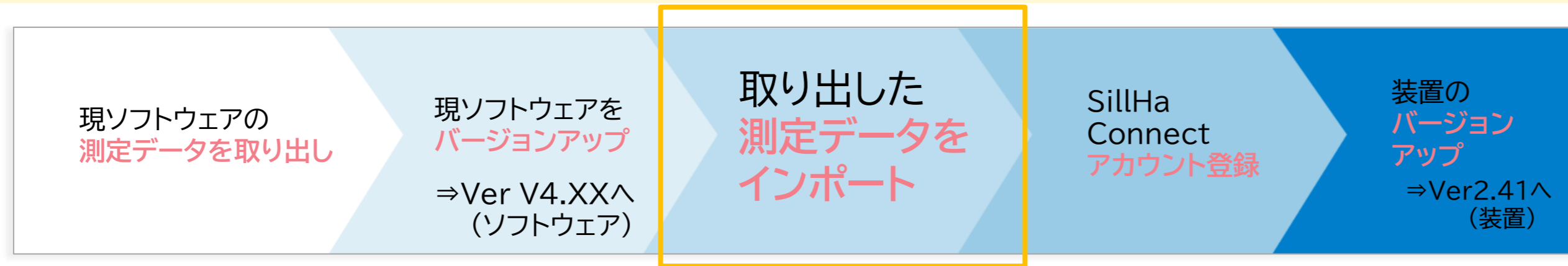

唾液検査結果シート
作成プログラムV4


測定データを取り出した際に
作成されたフォルダを選択します



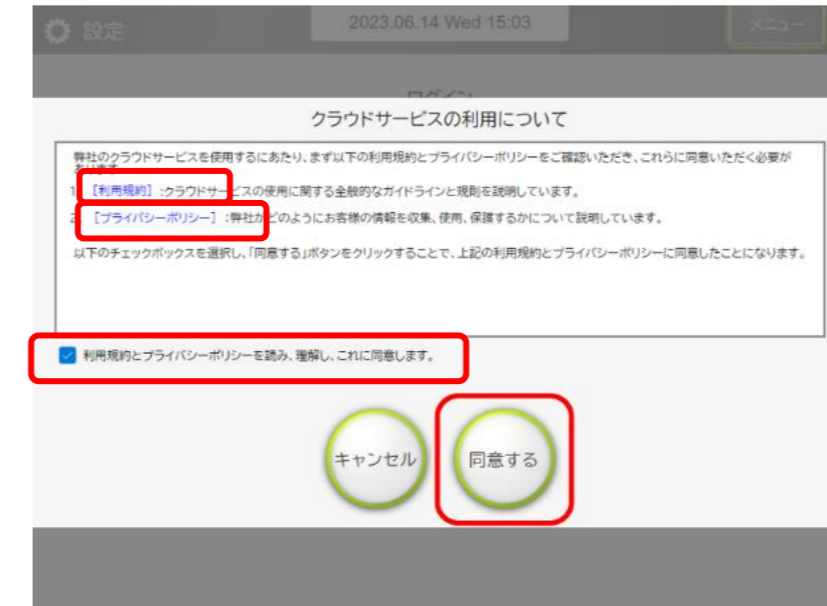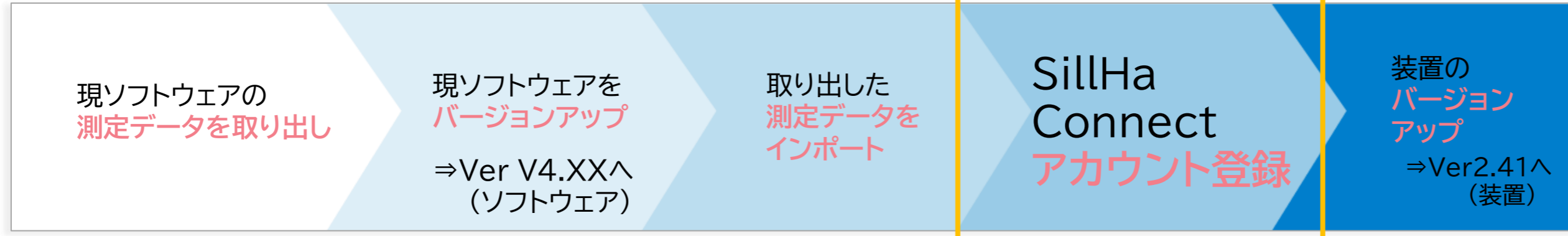

登録したメールアドレスとパスワードは
ログイン時に必要になります。
必ず控えていただくようお願いします。

入力したメールアドレスに
認証メールが届きます。

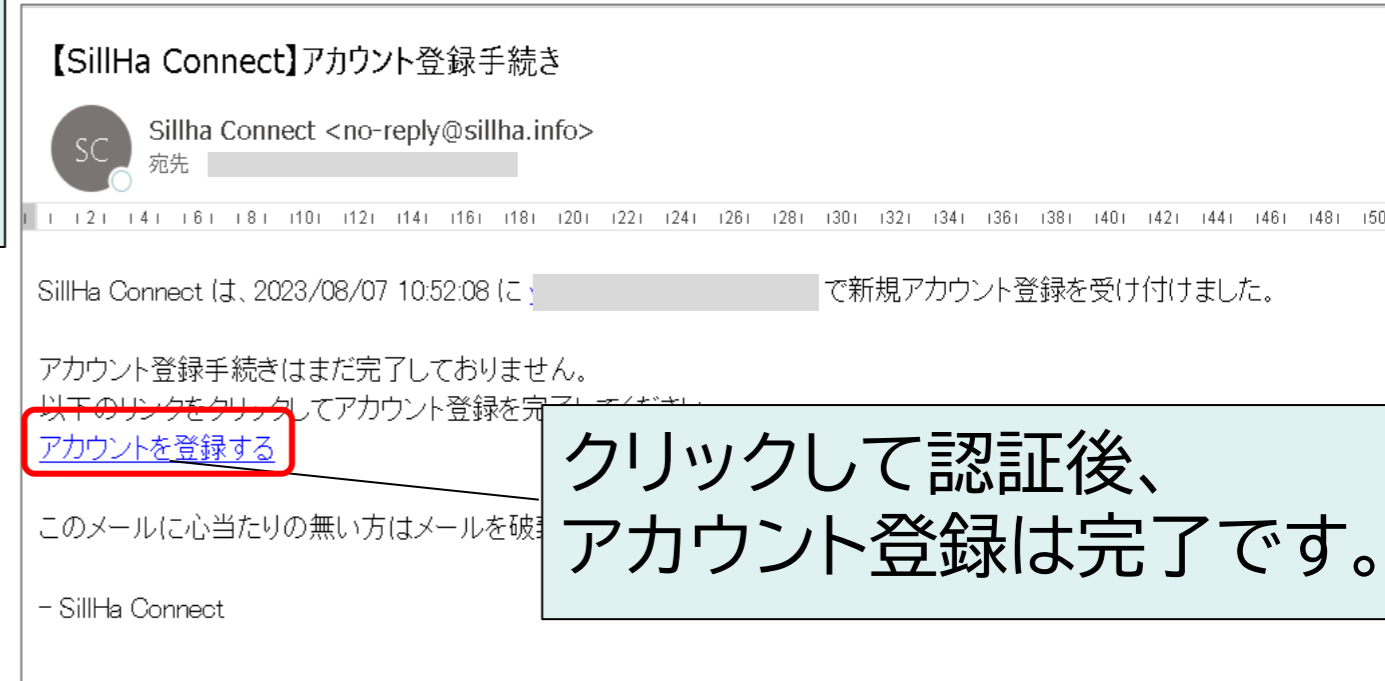


クリックして認証後、
アカウント登録は完了です。



「設定」→「ログイン」でログイン画面が表示されます。



装置を接続し、電源をONにして下さい。

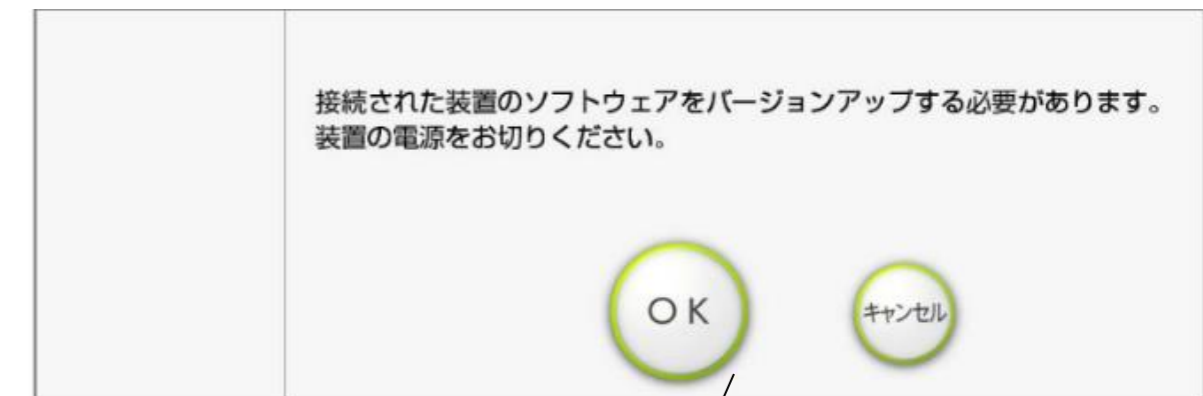

シグナル色 (Windows)	シグナル色 (Mac)	状態	対応方法
		正常です。	-
		ログイン認証に失敗しています。	一度ログアウトして、再度ログインしてください。 再ログイン後、シグナル色が変化しない場合は、インターネット接続状態を確認した後に、ソフトを再起動してください。
		サーバとの通信に失敗しています。	インターネット接続が正常であるかご確認ください。
		ログイン情報が設定されていません。	アカウント登録されている方はログインしてください。 アカウント登録をされていない方は、アカウントの新規登録を行ってください。

PCに表示される手順に沿って操作してください。
装置はVer2.41へバージョンアップされます。

導入の流れ

対応条件/OS

- ・インターネット接続ができる端末
- ・Windows10(64bit版) / Windows11(64bit版)
または Mac OS 10.15 ~ 13.4

SillHa Connect
特設ページからも
アクセスが可能です！

シルハコネクト



で検索！！

セミナー後に送付するメール内、

《ソフトウェアのインストールマニュアル》をクリック

シルハペーパー使用施設用 URL <http://www.arkray.co.jp/sw/3b/>

STチェック使用施設用 URL <http://www.arkray.co.jp/sw/4c/>

こちらのURLからもインストールマニュアルへ
アクセスできます。

現ソフトウェアの
測定データを取り出し

現ソフトウェアを
バージョンアップ

⇒Ver V4.XXへ
(ソフトウェア)

取り出した
測定データを
インポート

SillHa Connect
アカウント登録

装置の
バージョン
アップ

⇒Ver2.41へ
(装置)